

 <b>ES MÁS</b>	 <b>DIF</b> <b>ZAPOPAN</b>	<b>Sistema de Gestión de la Calidad</b>	 <b>Centro Metropolitano del Adulto Mayor</b>
--	---	---	---

1 de 5

<b>Título:</b> Procedimiento para la elaboración de coronas, puentes e incrustaciones por el técnico dental.		
<b>Clave:</b> P-DZ-AM-SA-26	<b>Revisión No:</b> 01	<b>Fecha de última revisión:</b> Marzo del 2009
<b>Fecha de publicación:</b> Marzo del 2009		
<b>Autor:</b> Saúl Contreras Gutiérrez.		<b>Reviso y autorizó:</b> Lic. María Guadalupe Díaz González
<b>Puesto/firma:</b> Técnico en laboratorio dental		<b>Puesto/firma:</b> Jefa de Departamento

**Objetivo:**

Establecer el procedimiento para la elaboración de coronas, puentes e incrustaciones.

**Alcance:**

Este procedimiento aplica para todo el personal del CEMAM que elabore coronas, puentes e incrustaciones.

**Responsabilidades:**

Todo el personal del CEMAM que elabore coronas, puentes e incrustaciones deberá apegarse a este procedimiento.

**Referencias:**




<b>Clave</b>	<b>Nombre</b>
--------------	---------------

**Formatos:**

<b>Clave</b>	<b>Nombre</b>
--------------	---------------

**Definiciones:**

**Cueles**

 ES MÁS	 DIF ZAPOPAN	Sistema de Gestión de la Calidad	 Centro Metropolitano del Adulto Mayor
---	---	--	---


2 de 5


## Procedimiento

### Técnico dental

1. Realizar modelo a partir de la impresión de silicón
2. Mezclar yeso con agua en proporción 2:1
3. Colocar modelo en vibrador
4. Retirar modelo.
5. Recortar excedentes en recortadora
6. Sacar instrumental (espátula lecrón, espátula 31, espátula 7 y pekatomas)
7. Encender mechero de **bunsen**
8. Aplicar separador yeso acrílico
9. Diseñar la corona o incrustación en cera
10. Dar anatomía
11. Revisar puntos de contacto
12. Adaptar cueles
13. Colocar en cubilete
14. Investir el encerado
15. Mezclar 100 grs. de investimento con 24 ml. de líquido de investimento
16. Colocar cubilete en vibrador
17. Verter investimento en cubilete
- 18- sigue el paso 26 al 38 del procedimiento 32

### Flujograma

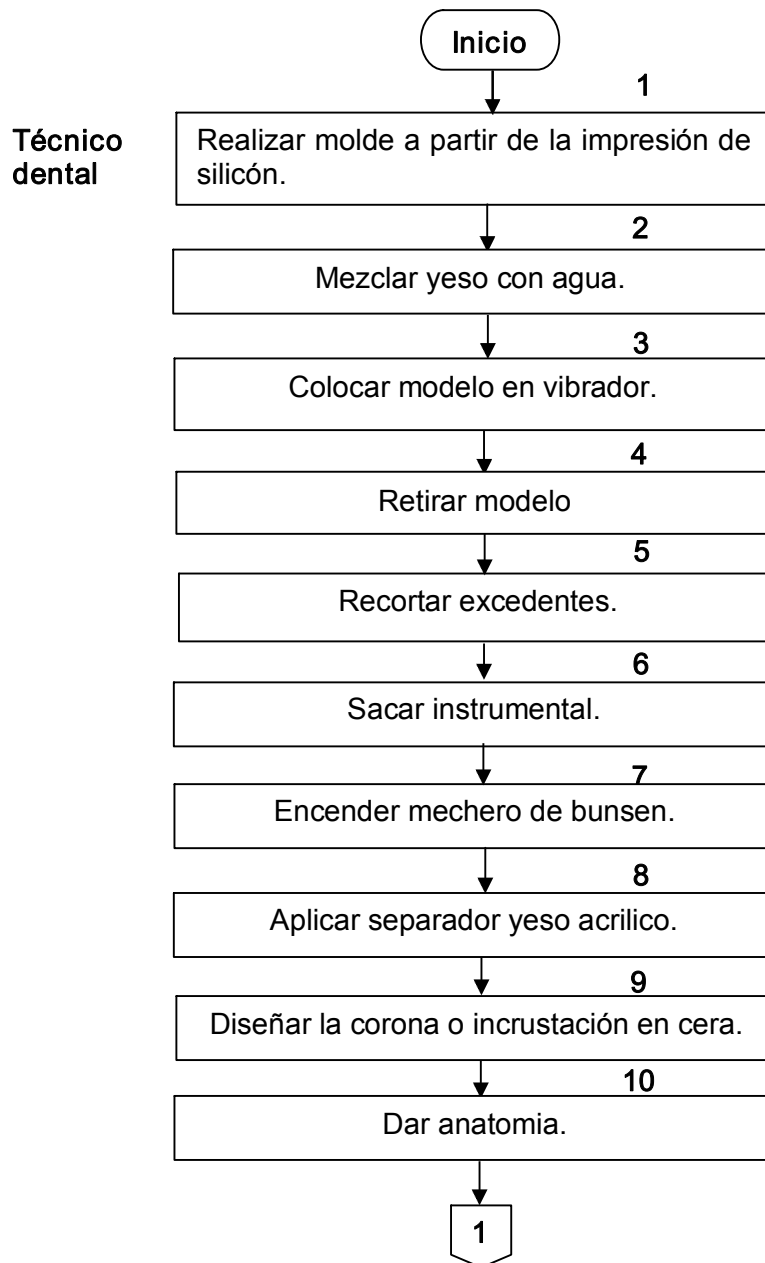

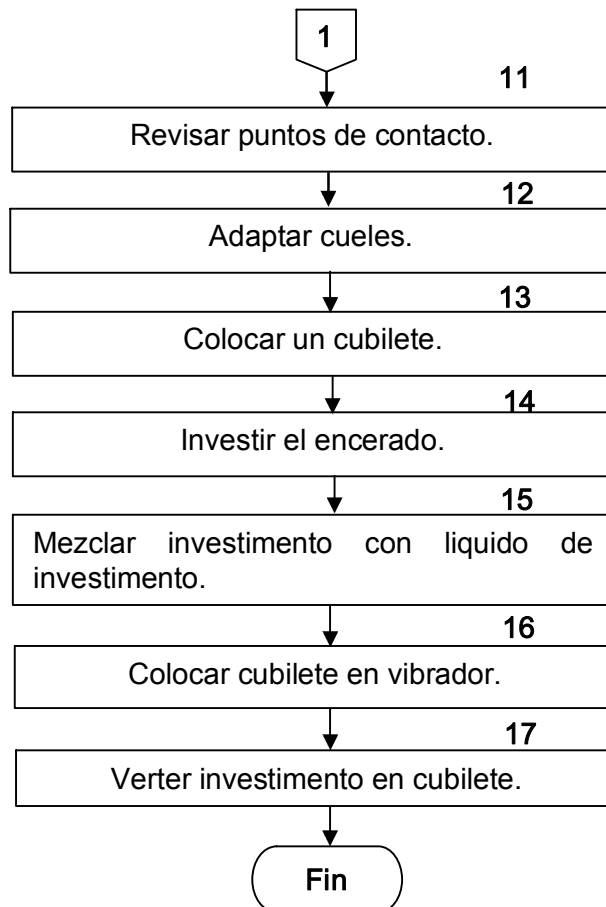



**DIF**  
**ZAPOCAN**

Sistema de  
Gestión de la  
Calidad



5 de 5

Hoja de registro de cambios

Numero	Fecha	Descripción	Responsable