



Sistema de Gestión  
de la Calidad



1 de 5

<b>Título:</b> Procedimiento para la elaboración de endoposte por el Técnico Dental.		
<b>Clave:</b> P-DZ-AM-SA-27	<b>Revisión No:</b> 02	<b>Fecha de última revisión:</b> Mayo del 2011
<b>Fecha de publicación:</b> Marzo del 2009		
<b>Autor:</b> Saúl Contreras Gutiérrez	<b>Reviso y autorizó:</b> Lic. María Guadalupe Díaz González	
<b>Puesto/firma:</b> Técnico en laboratorio dental	<b>Puesto/firma:</b> Jefa de Departamento	

**Objetivo:**

Establecer el procedimiento para la elaboración de endoposte.

**Alcance:**

Este procedimiento aplica para todo el personal del CEMAM que elabore endoposte.

**Responsabilidades:**

Todo el personal del CEMAM que elabore endoposte deberá apegarse a este procedimiento.

**Referencias:**

Clave	Nombre
-------	--------

**Formatos:**

Clave	Nombre
-------	--------

**Definiciones:**


**Endoposte:** Pieza que se coloca para ajustar perfectamente al conducto donde se contenía el paquete vasculonervioso del diente y a los tejidos dentarios remanentes.


## Procedimiento

### Técnico Dental

1. Añadir cuele al endoposte.
2. Investir el encerado.
3. Mezclar 100gramos de investimento con 24ml de líquido de investimento.
4. Colocar cubilete en vibrador.
5. Verter investimento en cubilete.
6. Colocar en horno el cubilete y calentar desde 0°C a 900°C.
7. Pasar cubilete una vez alcanzados los 900°C a la centrífuga.
8. Fundir metal cerámico de alloy en la centrífuga con combustión gas/oxígeno hasta alcanzar 1371°C.
9. Activar centrífuga.
10. Desgastar el metal con disco coutoff y piedra montada.
11. Enviar al Odontólogo.
12. En caso de que se le requiera. Realizar desgaste selectivo.
13. Enviar al Odontólogo.

### Flujograma

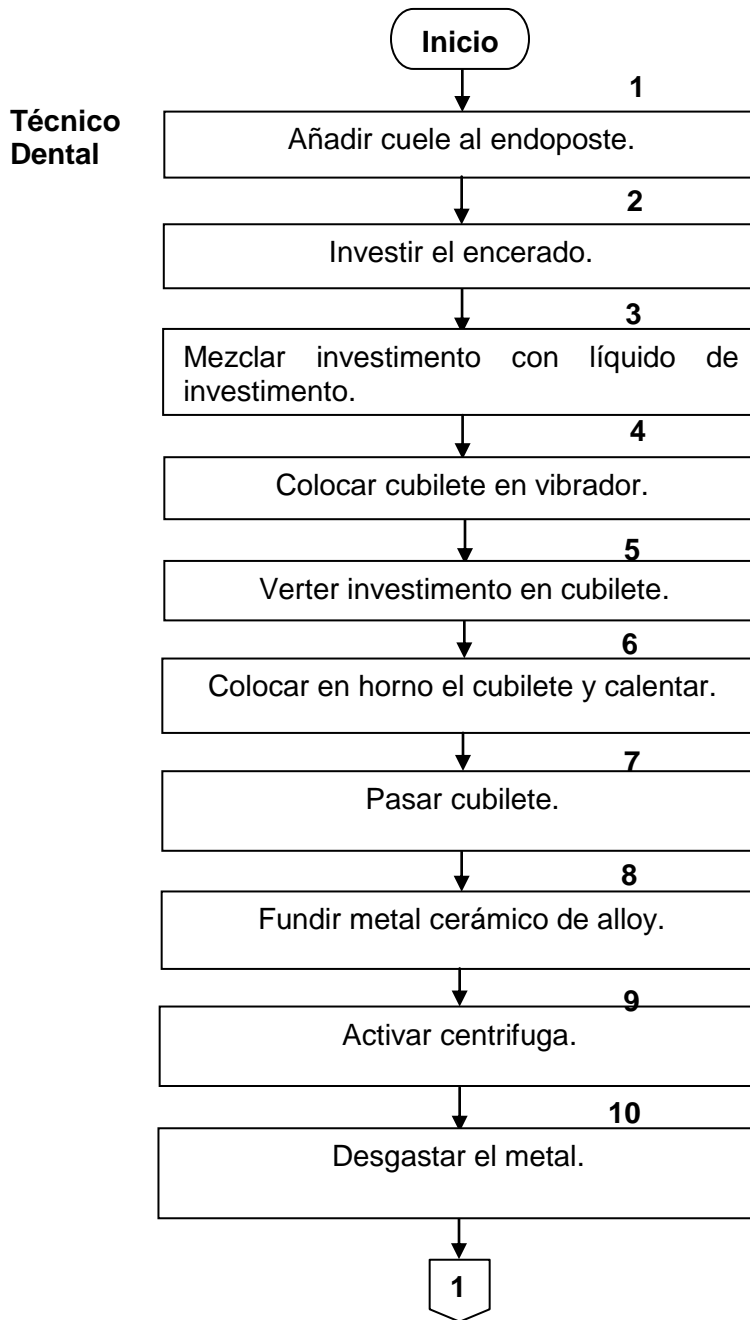

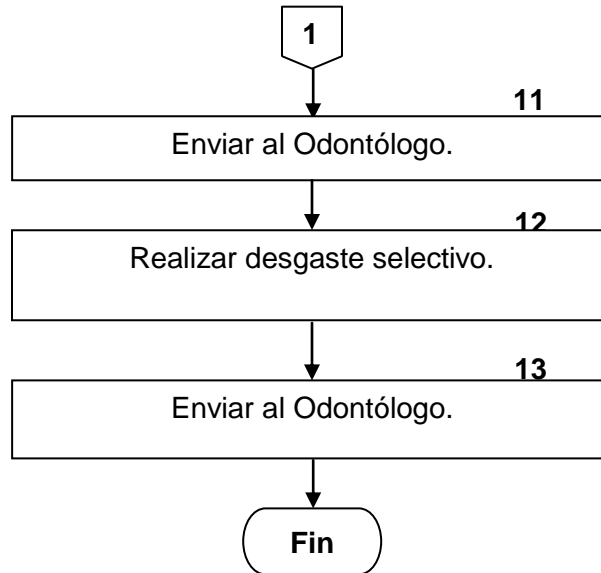



Sistema de Gestión  
de la Calidad



5 de 5

### Hoja de Registro de Cambios

Numero	Fecha	Descripción	Responsable
1	Mayo/2011	En las actividades 11 y 13 cambia el nombre de dentista por odontólogo	Lic. María Guadalupe Díaz González / Jefa de Departamento